

Antibacterial Mask Sheet

抗菌マスクシート

セラミック
コーティング

抗菌
99.9%
(最大)


快適な
通気性

脱臭
97%
(最大)

マスクの内側につけるだけで、
清潔を保ち、
マスクを長く使えます



サイズ
200×100mm

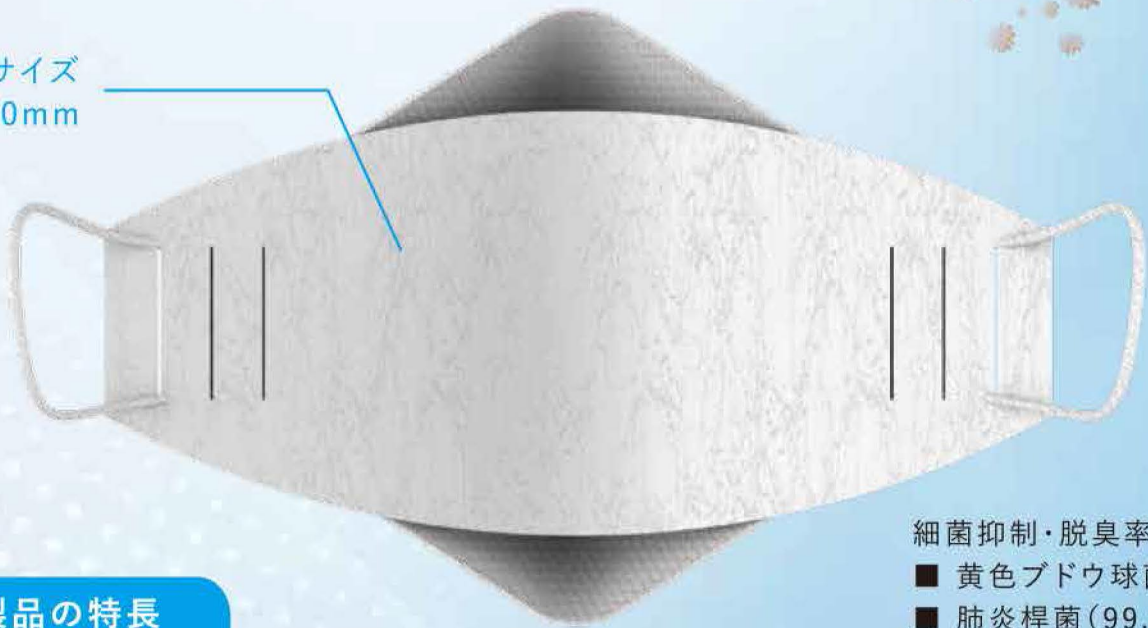

本製品の特長

本マスクシートは、
抗菌セラミックにより、
細菌、バクテリアなどの
繁殖をおさえ、
清潔な状態を保ちます。

細菌抑制・脱臭率

- 黄色ブドウ球菌 (99.9%)
- 肺炎桿菌 (99.9%)
- ホルムアルデヒド (82%)
- アンモニア (97%)

試験機関：韓国標準試験研究院

本製品にマスクは含まれていません。
製品イメージは実物と違う場合があります。
本製品は、マスクの内側につけて使用する補助シートです。




10枚入り
テープ付き



製品の使用方法

手をきれいに洗って、清潔な場所で行ってください

- ① マスクの内側を上に向けて平らな状態に置きます。
- ② マスクシート1枚と両面テープをパックから取り出します。
- ③ マスクの左右または上下に付属の両面テープを貼り、取り替えシートを合わせてつけます。(フィルム1枚に両面テープ2個使用)
- ④ マスクよりシートがはみ出る場合ははさみで切ってご使用ください。
- ⑤ ゴムを通して使用したい場合は、シートの両側にある切れ目に合わせてマスクのゴムを通してご使用ください。(切れ目の位置に合わせて通します)

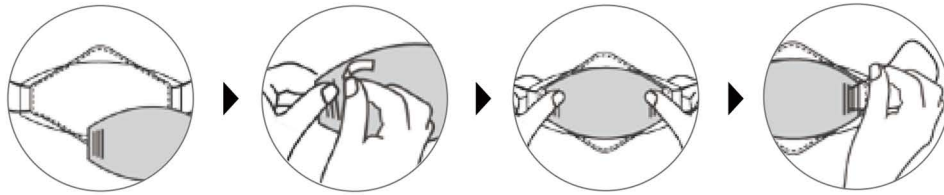

製品の効果

本マスクシートは菌の浸透などを抑制するために物理的な処理を行い、細菌などの繁殖をおさえ、清潔な状態を長持ちさせます。

試験項目	試料(CFU/ml)	細菌減少率	試験方法
(抗菌)黄色ブドウ球菌	1.1×10^5	99.9%	24時間後の濃度
(抗菌)肺炎桿菌	1.3×10^5	99.9%	24時間後の濃度
(抗菌)大腸菌	1.5×10^5	99.9%	24時間後の濃度
(脱臭)アンモニア	100PPM	97%	2時間後の測定値
(脱臭)ホルムアルデヒド	100PPM	82%	2時間後の測定値

SGS

韓国SGS試験研究院
(韓国SGS試験成績)

<人体有害成分テスト済>

KSTR

韓国標準試験研究院
Korea Standard Test Researcher

<菌及び脱臭試験済>

CE

注意事項

- 手を清潔にして行ってください。
- マスクシートを付けた後はシートの表面を触らないでください。
- マスクシートの表面を折ったり、変形しての使用はおやめください。
- 洗濯して使用しないでください。
- マスクシートの表面が汚れた時は新しいシートに交換してください。
- かゆみ、かぶれ、発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本シートは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

※本製品にマスクは含まれていません。

製品名: 抗菌マスクシート
数量: 10枚入り材質: PE不織布/セラミック
使用期限: 製造日から2年マスクシートサイズ: 200mm×100mm
< 輸入元: 株式会社YKC >

販売元: CSI株式会社 電話: 019-681-1271 メール: contact@csijp.net